

INSTRUCCIONES PARA EL USO

ANTES DE EMPEZAR DEBE LEER ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

- No ejecutar la prueba si está vencida o si la bolsa de aluminio que contiene la tira está mal sellada o abierta.
- No abrir la bolsa de aluminio hasta el momento de iniciar la prueba. En caso de guardarse refrigerada, esperar que haya alcanzado una temperatura de 20 a 30 °C antes de abrirla.
- Para un solo uso.
- Para uso externo. No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños.

¿QUÉ CONTIENE EL ESTUCHE?

- 1 bolsa de aluminio con 1 tira reactiva y 1 bolsita desecante.

¿CÓMO FUNCIONA ESTA PRUEBA?

Detecta la hormona Gonadotropina Coriónica humana (hCG, por sus siglas en inglés) en la orina de una mujer embarazada. La hCG la produce un embrión humano en desarrollo. Esta prueba es capaz de detectar hCG (resultado positivo) desde el primer día de falta de menstruación en más de un 99 % de los embarazos estudiados y no la detecta (resultado negativo) en igual proporción de las mujeres no embarazadas estudiadas.

¿CÓMO SE CONSERVA ESTA PRUEBA?

- En su envase original cerrado en refrigeración (de 2 a 16 °C) o a temperatura de local climatizado (de 17 a 30 °C). **Nunca congelar.**
- No exponer a la luz solar directa, ni a la humedad o el calor extremos.

¿QUÉ MUESTRA DE ORINA SE COLECTA?

Preferiblemente la primera de la mañana por contener mayor concentración de hCG. **No ingerir líquidos en abundancia para provocar la orina a coleccionar, pues esto pudiese brindar resultados no exactos.**

¿CÓMO SE COLECTA LA MUESTRA DE ORINA?

En un recipiente limpio y seco, de plástico o vidrio. No tiene que ser estéril. Colectar el volumen suficiente para poder ejecutar la prueba (ver Figura A en la solapa del estuche).

¿CÓMO SE REALIZA LA PRUEBA?

- Abrir la bolsa de aluminio rasgándola por uno de los cortes laterales que presenta en un extremo.
- Extraer la tira manipulándola por el extremo coloreado e introducirla en la muestra de orina por el extremo marcado con las flechas y éstas apuntando a la muestra (ver Figura A en la solapa del estuche).
- Mantener este extremo de la tira en la muestra de orina durante unos 15 segundos o hasta observar casi la totalidad de la zona de resultado teñida de color rojo pálido. Retirar la tira de la muestra y colocarla sobre una superficie horizontal, seca y limpia.

No introducir la tira en la muestra más allá de la línea que señalan las flechas (ver la Figura A en la solapa del estuche), pues de lo contrario la prueba no brindará resultados correctos.

- Leer el resultado de la prueba después de 10 minutos y nunca después de pasados 20 minutos.

¿CÓMO SABER EL RESULTADO?

Los posibles resultados se muestran en la Figura B incorporada a una de las solapas del estuche exterior.

1. POSITIVO (EMBARAZADA): Dos líneas de color en la zona de resultado. Ambas líneas no tienen que ser iguales en intensidad ni aparecer al mismo tiempo. En algunos casos la positiva es muy débil. La prueba ha detectado la hCG en la orina y es muy probable que la muestra sea de una embarazada.

2. NEGATIVO (NO EMBARAZADA): Sólo la línea control en la zona de resultado. La prueba no ha detectado la hCG en la orina y es muy probable que no exista embarazo.

3. NO VÁLIDO: No se observa la línea control.

¿QUÉ HACER DESPUÉS DEL RESULTADO?

- **UN RESULTADO POSITIVO (DOS LÍNEAS)** indica que es muy probable que exista un embarazo. Acudir a un especialista médico.
- **UN RESULTADO NEGATIVO (SÓLO LA LÍNEA CONTROL)** indica que es muy probable que no exista embarazo. Si se mantiene la sospecha, porque no aparece la menstruación, repetir la prueba en días posteriores, con una nueva tira reactiva. En caso de que la prueba sea nuevamente negativa, acudir a un especialista médico.
- **UN RESULTADO NO VÁLIDO** significa que la prueba no se ejecutó correctamente o no funcionó adecuadamente. Repetir la prueba con una nueva tira. De volver a repetirse el resultado no válido, notificar esta situación a la farmacia o tienda donde adquirió el producto, informando el número de lote de estas pruebas no válidas, referido en el estuche exterior.

LIMITACIONES DE ESTA PRUEBA

- Como toda prueba para el diagnóstico de embarazo, la confirmación final la debe realizar un especialista médico.
- Existen otras causas poco frecuentes que elevan la hCG en la orina y deben ser descartadas por un especialista médico.
- El embarazo ectópico (fuera del útero) presenta niveles elevados de hCG en orina. Los resultados con este tipo de prueba son similares a los de un embarazo normal.
- El aborto espontáneo es fuente de resultados contradictorios con estas pruebas.
- Algunos tratamientos para infertilidad utilizan hCG y pueden provocar resultados falsos con estas pruebas. Consultar con un especialista médico al respecto.
- Otras terapias hormonales con analgésicos o de anticonceptivos de uso oral o inyectables, aunque pueden provocar trastornos o irregularidades del ciclo menstrual, no deben afectar los resultados de estas pruebas.


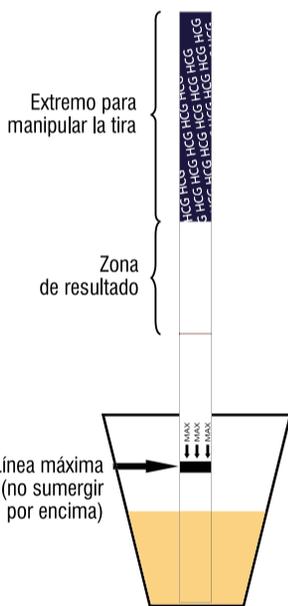


Figura A

Referencias para conocer los resultados

1. Positivo (Embarazada)

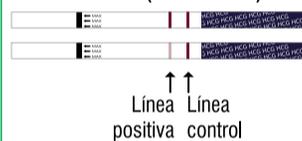

2. Negativo (No Embarazada)



3. No Válido



Figura B
POSIBLES RESULTADOS

of: 50365_DORSO.ap

diente: HEBER BIOTEC
ruta archivo: 43000879_6988_5
medidas: 130 x 0 x 75

fecha: 13/09/18 11:12
version: 1
ref cliente: D1112-33 ESTUCHE INDIVIDUAL DE HEBER-FAST LINE MATERNI TEST II
material: FOLDING BLANCO 275GR

acabados: BARNIZ ACRÍLICO

tintas/separaciones:

- PANTONE Process Black C
- PANTONE 209 C
- PANTONE 2768 C
- PANTONE 1235 C
- TROQUEL

reserva de barniz:

conforme:

LOS COLORES DE ESTA PRUEBA SON ORIENTATIVOS AL ESTAR CREADOS EN CONDICIONES QUE NO SON LAS DE IMPRESIÓN.

braille:

información
de trabajo

Leca
graphics
CYCOBOX

Avda. del Riu Mogent, 5
08170 Montornès del Vallès
Barcelona · Spain
Tel.: 93 579 93 60 · Fax: 93 579 93 63
cycobox@cycobox.com
www.cycobox.com