


Positive

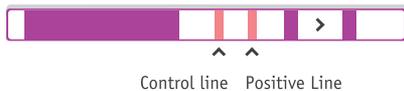

Negative



No valid



Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología

Empresa distintiva de la biotecnología cubana que desarrolla, produce, comercializa y exporta productos innovadores, para áreas claves de los sectores biomédico, veterinario, agropecuario, acuícola e industrial, por una única salud. Cuenta con una cartera de proyectos de investigación y desarrollo (I+D) y productos, protegidos por patentes. Sus más de 30 productos comercializados en más de 35 países, incluyen medicamentos primeros y únicos de su tipo, para tratar enfermedades que no cuentan con otras soluciones terapéuticas efectivas. Varios de sus medicamentos se insertan en programas nacionales, para ofrecer una atención integral a la salud. Trabaja con responsabilidad social y en armonía con el medio ambiente.

CIGB CENTRO
DE INGENIERÍA GENÉTICA
Y BIOTECNOLOGÍA

Ave. 31, e/ 158 y 190, Playa, Habana, Cuba
Tel: (537) 7271 6022
www.cigb.edu.cu



LinkedIn: CIGBCuba




Twitter: CIGBCuba



Facebook: CIGBCubaCuba

HeberFast Line[®] MaterniTest II

PRUEBA PARA DIAGNÓSTICO
TEMPRANO DE EMBARAZO

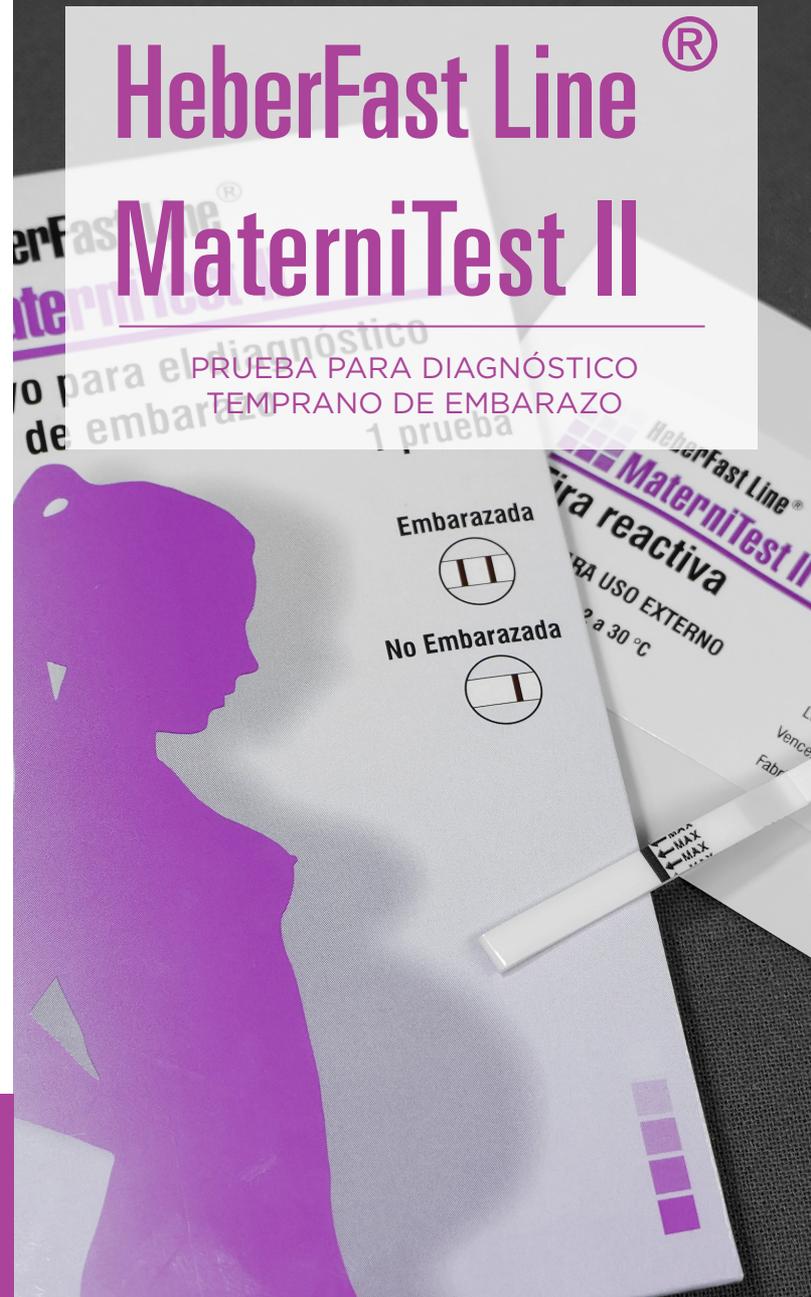

UN MÉTODO SENCILLO,
RÁPIDO Y CONFIABLE

HeberFast Line[®] MaterniTest II

Prueba para
diagnóstico
temprano
de embarazo

UN MÉTODO SENCILLO,
RÁPIDO Y CONFIABLE

PRESENTACIÓN

Estuche con una bolsa de aluminio que contiene una tira reactiva y una bolsita desecante para la conservación de la prueba.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original cerrado en refrigeración (de 2 a 16 °C) o a la temperatura de un local climatizado (de 2 a 30 °C). No congelar. No exponer a la luz solar directa ni a la humedad o el calor extremos.

INDICACIÓN

HeberFast Line[®] Maternitest II se recomienda para detectar la hormona gonadotropina coriónica humana (hCG) en la orina de una mujer embarazada (resultado positivo) desde el primer día en que falta la menstruación, en más de 99 % de los embarazos estudiados. No la detecta (resultado negativo) en igual proporción de las mujeres no embarazadas estudiadas.

FUNCIONAMIENTO DE LA PRUEBA

HeberFast Line[®] Maternitest II es una tira reactiva inmunocromatográfica cualitativa con anticuerpos monoclonales específicos que detectan la gonadotropina coriónica humana (hCG) en la orina de una mujer embarazada. Esta hormona comienza a producirse pocos días después de fecundado un óvulo. La prueba

es capaz de detectar esta hormona en la orina, desde el primer día de ausencia de menstruación, con más de 99 % de exactitud.

Durante el tiempo en que transcurre la prueba, se va formando una línea (llamada línea positiva), que solo aparece si la orina contiene la hCG y la mujer está embarazada.

Estos mismos reactivos forman una segunda línea (llamada línea control) que aparece siempre que la prueba se realice de forma correcta, independientemente de la presencia de hCG en la orina; es decir, en todas las muestras de orina.

La confirmación definitiva del resultado positivo o negativo debe emitirla un especialista.

